


# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS



## GUIDE D'UTILISATION

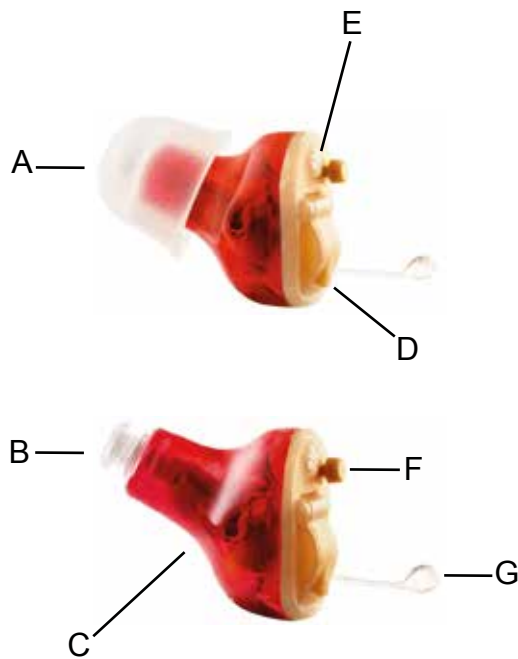

- A – Écouteur recouvert de l'embout en silicone
- B – Trou d'évent
- C – Coque ergonomique
- D – Ouverture du boîtier pile, rotation vers le haut
- E – Microphone
- F – Bouton poussoir ou molette de volume
- G – Languette de retrait

SERINITI

EAR WE ARE

[www.seriniti.fr](http://www.seriniti.fr)

[contact@seriniti.fr](mailto:contact@seriniti.fr)  
09 72 58 43 52



## MISE EN PLACE DE LA PILE

### **Avant-propos**

ORISON fonctionne avec une pile 10A.

ORISON est fourni avec une pile de mise en route, pour une utilisation immédiate.

### **Insérer la pile dans votre aide auditive**

Ouvrez, sans forcer, la porte du boîtier pile en maintenant l'appareil entre vos doigts et en poussant l'encoche du boîtier vers le haut, comme indiqué sur la figure 1.

Lorsque la porte du boîtier pile est entièrement ouverte, insérez la pile dans l'emplacement dédié.

Il n'y a qu'un sens pour glisser la pile : la languette de celle-ci doit être vers l'extérieur.

Ne forcez pas la mise en place de la pile, cela pourrait endommager votre appareil.

Retirez ensuite la languette de la pile et laissez le boîtier ouvert pendant 1 minute, afin de permettre à la pile de s'activer, au contact de l'air. Fermez la porte du boîtier pile après 1 minute : ORISON est allumé.

Si vous ne pouvez pas fermer la porte du boîtier pile, vérifiez que cette dernière est correctement installée, puis réitérez l'opération.



**Figure 1**  
Ouverture du boîtier pile



## ALLUMER / ÉTEINDRE ORISON

### **Allumer ORISON**

ORISON est allumé lorsque la porte du boîtier pile est fermée.  
Pour allumer ORISON : fermez la porte du boîtier pile.

### **Éteindre ORISON**

ORISON est éteint quand la porte du boîtier pile est ouverte.  
Pour éteindre ORISON, ouvrez la porte du boîtier pile.

### **Conseils d'utilisation**

Les piles 10A Rayovac Proline intègrent la technologie Zinc Air : elles tirent leur énergie de l'oxydation du zinc avec l'oxygène de l'air ambiant.

- **Optimiser la performance de votre pile**

Laissez votre pile à l'air libre pendant 1 minute, après retrait de la languette de protection, avant de fermer la porte du boîtier pile.

- **Optimiser la longévité de votre pile**

Pour limiter la décharge de votre pile, éteignez ORISON lorsque vous ne l'utilisez pas et limitez l'exposition de la pile à l'air. Pour cela, entrouvrez légèrement la porte du boîtier pile.



## MISE EN PLACE DE L'EMBOUT

### Avant-propos

ORISON est fourni avec un jeu de 3 embouts en silicone, appelés « embouts cônes », chacun de taille différente : S (petit), M (medium) et L (large). Ces embouts sont exclusivement dédiés à l'aide auditive ORISON et ne conviennent pas aux autres aides auditives intra-conduites.



### Mise en place de l'embout

L'embout doit permettre l'occlusion parfaite de votre conduit auditif : si ce n'est pas le cas, l'air passant sera amplifié, procurant ainsi un sifflement.

Prenez le temps de choisir la taille d'embout qui convient à celle de votre conduit : cette étape est fondamentale. Si besoin, faites plusieurs tests avec chaque embout.

Maintenez ORISON entre vos doigts et positionnez l'embout en silicone au niveau du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 2.

Poussez délicatement l'embout jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement emboîté sur le trou d'évent.

### Retrait de l'embout

Maintenez l'appareil entre vos doigts et tirez délicatement sur l'embout pour le séparer du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 3.



**Figure 2**  
Clipper l'embout sur ORISON



**Figure 3**  
Retirer l'embout d'ORISON



## INSÉRER ORISON DANS VOTRE CONDUIT AUDITIF

### Avant-propos

ORISON est disponible :

En rouge, pour l'oreille droite,

En bleu, pour l'oreille gauche.

Assurez-vous de placer votre appareil dans le conduit correspondant.

### Mise en place d'ORISON

Faites doucement glisser l'appareil dans votre conduit, en positionnant la languette de retrait vers le bas, jusqu'à l'arrêt naturel d'ORISON.

Au besoin, tirez doucement votre lobe vers le bas ou votre pavillon vers le haut, pendant l'introduction, pour faciliter la mise en place.

Le sifflement, tout au long de l'introduction, est normal : il cesse dès qu'ORISON est correctement installé. Si le sifflement vous gêne, laissez la porte du boîtier pile ouverte pendant l'introduction d'ORISON dans votre oreille, vous la fermerez quand ORISON sera installé.

Si le sifflement persiste, il peut s'agir :

- D'un mauvais choix dans la taille de l'embout : changez l'embout et réitérez l'opération;
- De la présence d'un bouchon de cérumen dans votre conduit : consultez un médecin ORL qui procédera à son extraction.



### Retirer ORISON de votre conduit auditif

Tirer doucement sur la languette de retrait de l'appareil.

Ne jamais utiliser la porte du boîtier pile ou le bouton de changement des programmes, cela pourrait endommager votre appareil.

# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS



## CHOISIR LE VOLUME D'AMPLIFICATION


### Volume d'amplification

Votre aide auditive ORISON amplifie les sons utiles de 10 à 33dB.

Réglez le volume à votre convenance grâce à la partie métallique de la brosse fournie, comme indiqué sur la figure suivante :

- De gauche à droite pour augmenter le volume
- De droite à gauche pour diminuer le volume

**Figure 4**  
Choix du volume

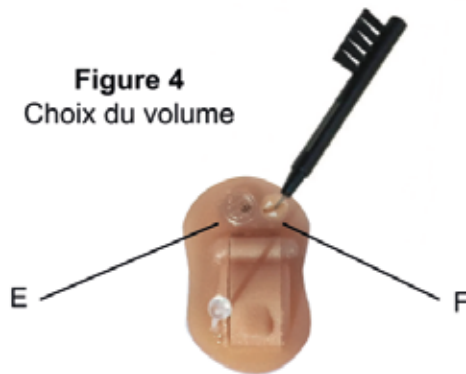

E >> Microphone

F >> Molette de volume



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### **Votre conduit auditif**

L'utilisation répétée d'une aide auditive intra conduit peut entraîner une accumulation de cérumen dans votre conduit. Or, une grande quantité de cérumen accumulée peut affecter la qualité du son de votre appareil et procurer un sifflement à l'utilisation. Assurez-vous que vos conduits restent propres.

### **L'embout**

L'embout en silicone doit être nettoyé régulièrement afin qu'aucune saleté n'obstrue la partie qui le relie au trou d'évent, la capacité de restitution des sons de votre appareil risquant alors d'être impactée.

Pour nettoyer votre embout, retirez-le de l'appareil et nettoyez-le avec la brosse fournie, dédiée à cet usage. Au besoin, munissez-vous d'un chiffon doux pour réaliser cette opération.

Si vous mouillez l'embout, assurez-vous qu'il soit sec avant de le mettre en place sur l'appareil.

Par mesure d'hygiène, nous recommandons de changer vos embouts tous les 15 à 20 jours.

### **Le trou d'évent**

Au même titre que l'embout, le trou d'évent doit être nettoyé régulièrement afin que la qualité de restitution des sons de votre appareil ne soit pas impactée. Pour cela, nettoyez-le avec la brosse dédiée, fournie à cet usage ou avec un chiffon sec.

Ne mouillez pas le trou d'évent, n'utilisez pas d'eau pour le nettoyer, vous risqueriez d'endommager votre appareil.

### **ORISON**

Nettoyez régulièrement votre aide auditive avec un chiffon doux non humidifié.

Ne jamais utiliser de solution nettoyante ou tout autre liquide comme de l'eau, cela pourrait endommager votre appareil.



## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### **Étanchéité**

ORISON n'est pas étanche : retirez-le avant de prendre une douche ou d'aller nager. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, séchez-le avec un coton sec et placez-le dans une pièce aérée. Si, malgré cela, des dysfonctionnements apparaissent, contactez le Service Client.

### **Rangement**

Lorsque vous n'utilisez pas ORISON, ouvrez la porte du boîtier pile et rangez-le dans sa boîte de rangement.

### **Températures extrêmes**

N'exposez jamais votre appareil à des températures extrêmes ou prolongées, ne le laissez pas sous le soleil.

### **Anti-vibration**

Ne cognez pas vos appareils les uns contre les autres, ne les cognez pas contre une surface dure, cela pourrait les endommager.

### **Autres**

Ne portez pas vos appareils lors de radiographies, de scanner, d'IRM ou de tout examen similaire.

Utilisez des piles adaptées à ORISON.

### **Conditions générales de sécurité**

- Tenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'ingestion des composants;
- Ne jeter pas les piles usagées dans le feu;
- Ne pas ingérer les piles, ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin;
- Ne portez pas ORISON si vous ne ressentez pas de gêne auditive;
- Les enfants ne doivent pas porter l'appareil sans les recommandations d'un adulte.





## DYSFONCTIONNEMENTS POUVANT ÊTRE OBERVÉS

PROBLÈME	CAUSES	SOLUTION
Sifflement	L'appareil n'est pas porté correctement	Corriger le port
	Le programme sélectionné n'est pas celui qui vous convient	Changer le programme
	Vos doigts, votre main ou d'autres objets se trouvent trop près de l'appareil	Éloignez vos doigts, votre main ou d'autres objets de votre oreille
	Bouchon de cérumen dans le conduit auditif	Consultez un médecin ORL
Silence	L'appareil est éteint	Allumer l'appareil
	La pile n'est pas installée dans l'appareil	Installer la pile
	La pile n'a pas été laissée 1 minute à l'air	Laissez la pile 1 minute à l'air
	La pile est faible ou usagée	Remplacer la pile par une pile neuve
	De la poussière ou du cérumen bloque l'embout ou le trou d'évent	Nettoyer l'embout et le trou d'évent
Bips réguliers Faible amplification Distorsions	La pile est faible ou usagée	Remplacer la pile par une pile neuve
	De la poussière ou du cérumen bloque l'embout ou le trou d'évent	Nettoyer l'embout et le trou d'évent
	L'appareil est humide ou mouillé	Contactez le Service Client
	Votre gêne auditive a évolué	Consultez un médecin ORL
Je ne peux pas changer le programme	De la poussière ou du cérumen bloque le bouton de réglages	Nettoyer délicatement votre appareil
Mon appareil consomme beaucoup	L'appareil est allumé quand il ne sert pas	Éteignez votre appareil quand vous ne l'utilisez pas
	La pile est faible ou usagée	Remplacer la pile par une pile neuve
	L'appareil est humide ou mouillé	Contactez le Service Client