


ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX
QUI N'EN VEULENT PAS



GUIDE D'UTILISATION

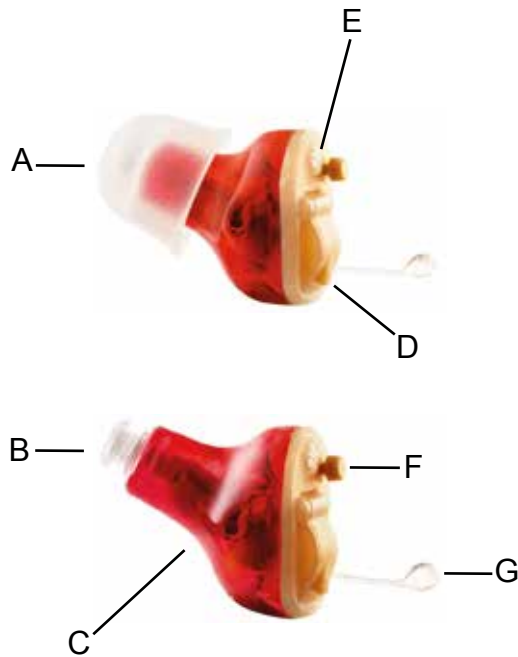

- A – Écouteur recouvert de l'embout en silicone
- B – Trou d'évent
- C – Coque ergonomique
- D – Ouverture du boîtier pile, rotation vers le haut
- E – Microphone
- F – Bouton poussoir de changement des programmes
- G – Languette de retrait

SERINITI

EAR WE ARE

www.seriniti.fr

contact@seriniti.fr
09 72 58 43 52



MISE EN PLACE DE LA PILE

Avant-propos

ORISON fonctionne avec une pile 10A.

ORISON est fourni avec une pile de mise en route, pour une utilisation immédiate.

Insérer la pile dans votre aide auditive

Ouvrez, sans forcer, la porte du boîtier pile en maintenant l'appareil entre vos doigts et en poussant l'encoche du boîtier vers le haut, comme indiqué sur la figure 1.

Lorsque la porte du boîtier pile est entièrement ouverte, insérez la pile dans l'emplacement dédié.

Il n'y a qu'un sens pour glisser la pile : la languette de celle-ci doit être vers l'extérieur.

Ne forcez pas la mise en place de la pile, cela pourrait endommager votre appareil.

Retirez ensuite la languette de la pile et laissez le boîtier ouvert pendant 1 minute, afin de permettre à la pile de s'activer, au contact de l'air. Fermez la porte du boîtier pile après 1 minute : ORISON est allumé.

Si vous ne pouvez pas fermer la porte du boîtier pile, vérifiez que cette dernière est correctement installée, puis réitérez l'opération.



Figure 1
Ouverture du boîtier pile



ALLUMER / ÉTEINDRE ORISON

Allumer ORISON

ORISON est allumé lorsque la porte du boîtier pile est fermée.
Pour allumer ORISON : fermez la porte du boîtier pile.

Éteindre ORISON

ORISON est éteint quand la porte du boîtier pile est ouverte.
Pour éteindre ORISON, ouvrez la porte du boîtier pile.

Conseils d'utilisation

Les piles 10A Rayovac Proline intègrent la technologie Zinc Air : elles tirent leur énergie de l'oxydation du zinc avec l'oxygène de l'air ambiant.

- **Optimiser la performance de votre pile**

Laissez votre pile à l'air libre pendant 1 minute, après retrait de la languette de protection, avant de fermer la porte du boîtier pile.

- **Optimiser la longévité de votre pile**

Pour limiter la décharge de votre pile, éteignez ORISON lorsque vous ne l'utilisez pas et limitez l'exposition de la pile à l'air. Pour cela, entrouvrez légèrement la porte du boîtier pile.