


# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS



## GUIDE D'UTILISATION

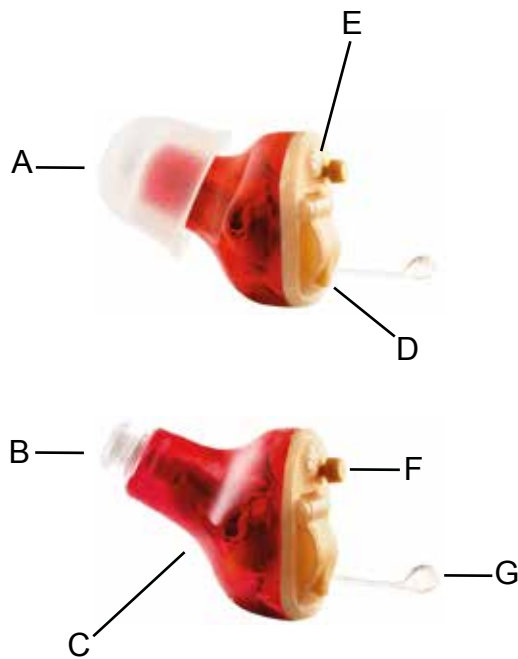

- A – Écouteur recouvert de l'embout en silicone
- B – Trou d'évent
- C – Coque ergonomique
- D – Ouverture du boîtier pile, rotation vers le haut
- E – Microphone
- F – Bouton poussoir de changement des programmes
- G – Languette de retrait

SERINITI


EAR WE ARE

[www.seriniti.fr](http://www.seriniti.fr)

[contact@seriniti.fr](mailto:contact@seriniti.fr)  
09 72 58 43 52

# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS

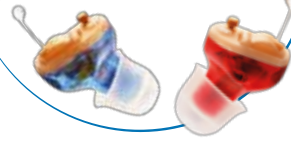

## LES TYPES D'EMBOUTS



### • Les embouts « Cône »

ORISON est fourni avec un jeu de 3 embouts en silicone appelés embouts «Cônes», chacun de taille différente : S (petit), M (moyen) et L (large).

Les embouts «Cônes» permettent une occlusion optimale du conduit auditif et une tenue parfaite d'ORISON dans votre oreille.

Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et ne conviennent pas aux autres aides auditives intra-conduit.



### • Les embouts « Tulipe »

Les embouts «Tulipes» sont davantage destinés :

- Aux conduits auditifs atypiques c'est à dire très petits ou coudés,
- Aux utilisateurs portant ORISON toute la journée et souhaitant un embout plus souple que le cône.

Très souples, agréables à porter, ces embouts s'adaptent à tous types de conduits auditifs et permettent aux utilisateurs «d'oublier» qu'ils portent une aide auditive. Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et sont disponibles en 3 tailles : S, M et L.



## MISE EN PLACE DE L'EMBOUT

### Mise en place de l'embout

L'embout doit permettre l'occlusion parfaite de votre conduit auditif : si ce n'est pas le cas, l'air passant sera amplifié, procurant ainsi un sifflement.

Prenez le temps de choisir la taille d'embout qui convient à celle de votre conduit : cette étape est fondamentale. Si besoin, faites plusieurs tests avec chaque embout.

Maintenez ORISON entre vos doigts et positionnez l'embout en silicone au niveau du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 2.

Poussez délicatement l'embout jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement emboîté sur le trou d'évent.

### Retrait de l'embout

Maintenez l'appareil entre vos doigts et tirez délicatement sur l'embout pour le séparer du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 3.



**Figure 2**  
Clipper l'embout sur ORISON



**Figure 3**  
Retirer l'embout d'ORISON