


# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS



## GUIDE D'UTILISATION

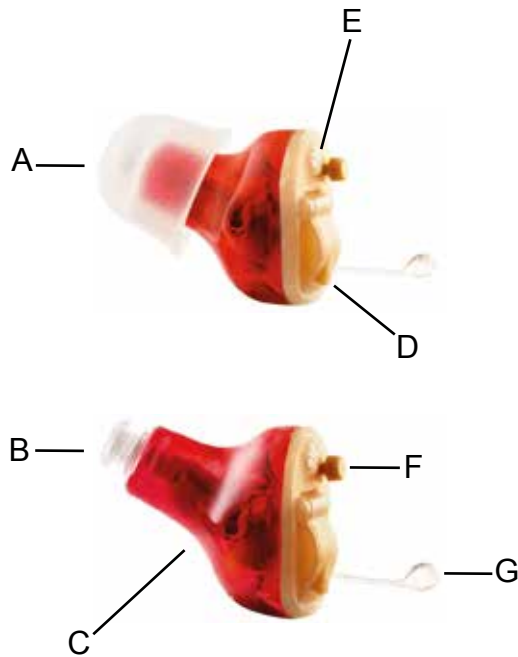

- A – Écouteur recouvert de l'embout en silicone
- B – Trou d'évent
- C – Coque ergonomique
- D – Ouverture du boîtier pile, rotation vers le haut
- E – Microphone
- F – Bouton poussoir de changement des programmes
- G – Languette de retrait

SERINITI

EAR WE ARE

[www.seriniti.fr](http://www.seriniti.fr)

[contact@seriniti.fr](mailto:contact@seriniti.fr)  
09 72 58 43 52

# ORISON

L'AIDE AUDITIVE DE CEUX  
QUI N'EN VEULENT PAS



## LES TYPES D'EMBOUTS



### • Les embouts « Cône »

ORISON est fourni avec un jeu de 3 embouts en silicone appelés embouts «Cônes», chacun de taille différente : S (petit), M (moyen) et L (large).

Les embouts «Cônes» permettent une occlusion optimale du conduit auditif et une tenue parfaite d'ORISON dans votre oreille.

Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et ne conviennent pas aux autres aides auditives intra-conduit.



### • Les embouts « Tulipe »

Les embouts «Tulipes» sont davantage destinés :

- Aux conduits auditifs atypiques c'est à dire très petits ou coudés,
- Aux utilisateurs portant ORISON toute la journée et souhaitant un embout plus souple que le cône.

Très souples, agréables à porter, ces embouts s'adaptent à tous types de conduits auditifs et permettent aux utilisateurs «d'oublier» qu'ils portent une aide auditive. Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et sont disponibles en 3 tailles : S, M et L.



## MISE EN PLACE DE L'EMBOUT

### Mise en place de l'embout

L'embout doit permettre l'occlusion parfaite de votre conduit auditif : si ce n'est pas le cas, l'air passant sera amplifié, procurant ainsi un sifflement.

Prenez le temps de choisir la taille d'embout qui convient à celle de votre conduit : cette étape est fondamentale. Si besoin, faites plusieurs tests avec chaque embout.

Maintenez ORISON entre vos doigts et positionnez l'embout en silicone au niveau du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 2.

Poussez délicatement l'embout jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement emboîté sur le trou d'évent.

### Retrait de l'embout

Maintenez l'appareil entre vos doigts et tirez délicatement sur l'embout pour le séparer du trou d'évent, comme indiqué sur la figure 3.



**Figure 2**  
Clipper l'embout sur ORISON



**Figure 3**  
Retirer l'embout d'ORISON



## MISE EN PLACE DE LA PILE

### **Avant-propos**

ORISON fonctionne avec une pile 10A.

ORISON est fourni avec une pile de mise en route, pour une utilisation immédiate.

### **Insérer la pile dans votre aide auditive**

Ouvrez, sans forcer, la porte du boîtier pile en maintenant l'appareil entre vos doigts et en poussant l'encoche du boîtier vers le haut, comme indiqué sur la figure 1.

Lorsque la porte du boîtier pile est entièrement ouverte, insérez la pile dans l'emplacement dédié.

Il n'y a qu'un sens pour glisser la pile : la languette de celle-ci doit être vers l'extérieur.

Ne forcez pas la mise en place de la pile, cela pourrait endommager votre appareil.

Retirez ensuite la languette de la pile et laissez le boîtier ouvert pendant 1 minute, afin de permettre à la pile de s'activer, au contact de l'air. Fermez la porte du boîtier pile après 1 minute : ORISON est allumé.

Si vous ne pouvez pas fermer la porte du boîtier pile, vérifiez que cette dernière est correctement installée, puis réitérez l'opération.



**Figure 1**  
Ouverture du boîtier pile



## ALLUMER / ÉTEINDRE ORISON

### **Allumer ORISON**

ORISON est allumé lorsque la porte du boîtier pile est fermée.  
Pour allumer ORISON : fermez la porte du boîtier pile.

### **Éteindre ORISON**

ORISON est éteint quand la porte du boîtier pile est ouverte.  
Pour éteindre ORISON, ouvrez la porte du boîtier pile.

### **Conseils d'utilisation**

Les piles 10A Rayovac Proline intègrent la technologie Zinc Air : elles tirent leur énergie de l'oxydation du zinc avec l'oxygène de l'air ambiant.

- **Optimiser la performance de votre pile**

Laissez votre pile à l'air libre pendant 1 minute, après retrait de la languette de protection, avant de fermer la porte du boîtier pile.

- **Optimiser la longévité de votre pile**

Pour limiter la décharge de votre pile, éteignez ORISON lorsque vous ne l'utilisez pas et limitez l'exposition de la pile à l'air. Pour cela, entrouvrez légèrement la porte du boîtier pile.