

ENTRETIEN QUOTIDIEN ET CHANGEMENT DE LA GRILLE DE PROTECTION

À l'utilisation de votre appareil auditif intra-auriculaire Orison, du cérumen peut s'accumuler sur l'embout et le trou d'évent. Invisible à l'œil, ce dépôt peut bloquer la restitution des sons de votre appareil ou maintenir un sifflement perpétuel.

Apprenez à nettoyer régulièrement Orison et à changer la grille de protection anti-cérumen afin d'éviter qu'une telle situation ne se produise.



ENTRETIEN QUOTIDIEN

Veillez à nettoyer régulièrement votre appareil auditif :

- Après chaque utilisation, retirez l'embout en silicone et frottez-le avec la brosse dédiée, en vous assurant que la partie percée soit débarrassée de tout dépôt ;
- Passez un coup de brosse énergique sur le trou d'évent, afin d'éviter l'accumulation de dépôt sur cette partie également.

CHANGEMENT DE LA GRILLE DE PROTECTION ANTI CERUMEN

Si, malgré un entretien régulier, vous constatez un dysfonctionnement, une perception lointaine des sons voire une absence d'amplification, même avec une pile neuve, cela signifie que le trou d'évent est obstrué par un dépôt de cérumen. Changez alors la grille de protection, en suivant les étapes ci-jointes.

1

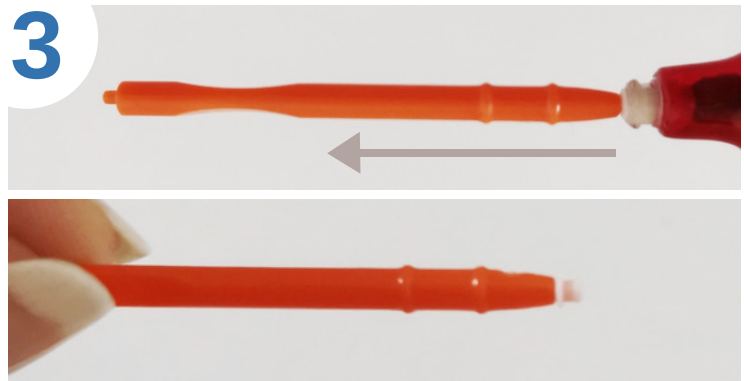
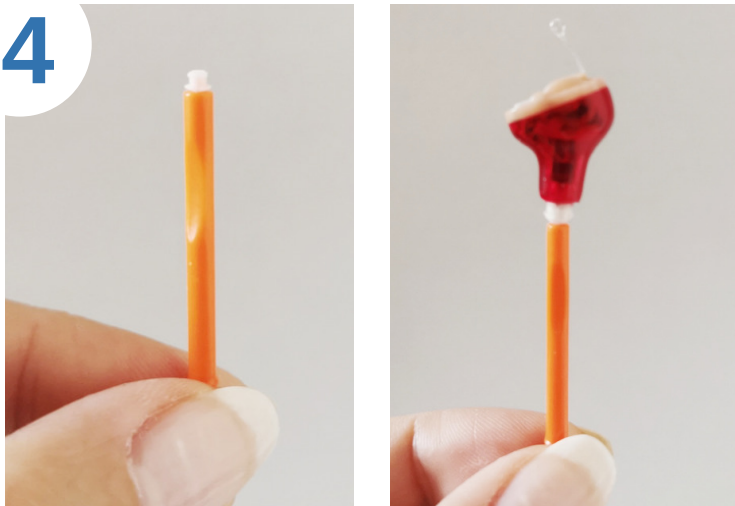
Vous disposez, dans la boîte de votre appareil Orison, d'une plaquette contenant 5 grilles de protection anti-cérumen ainsi qu'un outil dédié, orange.

Sur cet outil :

- Un côté dispose de 2 anneaux gravés : il sera utilisé pour retirer la grille de protection en place ;
- Un côté est biseauté : il sera utilisé pour insérer la nouvelle grille.

2

Retirez l'embout en silicone de votre appareil auditif : vous vous retrouvez face au trou d'évent dans lequel est inséré une grille de protection. Insérez l'outil dédié dans le trou d'évent et tirez.

3**4**

Récupérez une nouvelle grille de protection sur la plaquette et insérez-la dans le trou d'évent d'Orison.

